

Мульти-Гин Актигель



Гель для нормализации вагинальной микрофлоры

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕЛЯ Мульти-Гин Актигель. СОХРАНИТЕ ЛИСТОК ДЛЯ СПРАВОК

Мульти-Гин Актигель

- используется при Бактериальном Вагинозе (БВ)
- уменьшает неприятный запах и выделения
- оказывает успокаивающее действие при зуде и раздражении
- способствует предотвращению вагинального дискомфорта

Способ действия геля Мульти-Гин Актигель

Актигель основан на патентованном комплексе 2QR. Данное натуральное вещество состоит из биоактивных полисахаридов и обладает уникальной способностью блокировать механизм адгезии вредных бактерий и, таким образом, нейтрализует действие этих бактерий. Этот блокирующий эффект не обусловлен токсическими веществами или агрессивными химикатами, поэтому комплекс не обладает отрицательными побочными свойствами. Помимо основного свойства, позволяющего блокировать вредные бактерии, гель Мульти-Гин Актигель укрепляет естественную восстановительную способность тканей и улучшает состояние слизистой оболочки. Он быстро восстанавливает оптимальную кислотность влагалища (показатель pH). Гель Мульти-Гин Актигель способствует росту численности полезных лактобактерий (молочнокислых бактерий), в результате чего создает оптимальную и естественную микрофлору, препятствующую появлению дискомфорта.

Инструкция по применению

Вы можете использовать гель Мульти-Гин Актигель сколь угодно часто, каждый раз, когда Вы испытываете или желаете предотвратить такие виды дискомфорта, как зуд, повышенную чувствительность или раздражение.

- При комплексном применении при бактериальном вагинозе (БВ), сопровождающегося нежелательными выделениями и/или запахом, вводите гель во влагалище не менее двух раз в сутки в течение 5 дней.

- Для профилактики нежелательных выделений, запаха и, связанных с ними жалоб, гель достаточно применять один раз каждые три дня. При более частом применении средства эффективность возрастает. Гель рекомендуется наносить перед сном. При незащищенном половом акте кислотность (pH) влагалища нарушается. Используйте гель Мульти-Гин Актигель в течение 8 часов после полового акта для восстановления оптимального pH влагалища и профилактики появления неприятного запаха.

- В случае вагинального дискомфорта, который может проявляться как зуд, раздражение, чувствительность, краснота и болезненность, обильно наносите гель Мульти-Гин Актигель не реже одного раза в день и каждый раз, когда необходимо устранить дискомфорт.

Внимание!

После нанесения геля у Вас может возникнуть легкое пощипывание. Это нормально, и эти ощущения быстро исчезнут. Мульти-Гин Актигель может использоваться в сочетании с любыми лекарственными средствами. В случае длительных или повторяющихся жалоб необходимо обратиться к врачу. Курс применения геля Мульти-Гин Актигель не должен превышать 30 дней, чтобы вагинальная микрофлора могла саморегулироваться без поддержки препаратов.

Состав:

Экстракт барбадосского алоэ, маннан, сетчатый сополимер галактоарабиана и полиглюконовой кислоты*, глицерин, каприлилгликоль.

* Комплекс 2QR: запатентованный комплекс биоактивных полисахаридов.

Не содержит отдушек, ингредиентов животного происхождения, агрессивных химикатов, консервантов или гормонов.

Побочные действия

Случаи развития аллергических реакций на Мульти-Гин Актигель очень редки. Если у Вас возникли сомнения, то нанесите небольшое количество геля на внутреннюю часть предплечья. Если в результате этого у Вас появится зудящее покраснение, то применение геля Мульти-Гин Актигель не рекомендуется.

Поскольку pH геля Мульти-Гин Актигель соответствует оптимальной кислотности влагалища, а сперма имеет щелочную реакцию, применение геля Мульти-Гин Актигель может приводить к снижению активности сперматозоидов. Поэтому, если Вы хотите забеременеть, гель Мульти-Гин Актигель не следует использовать перед или в первые часы после полового акта. Другие побочные эффекты неизвестны.

Не нарушает целостности презерватива.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Гель Мульти-Гин Актигель не взаимодействует с другими лекарственными средствами.

Применение во время беременности и грудного вскармливания

Гель Мульти-Гин Актигель безопасен при применении в период беременности и грудного вскармливания.

Форма выпуска:

Гель 50 мл. Туба с завинчивающимся колпачком и аппликатором вместе с инструкцией помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Гель Мульти-Гин Актигель рекомендуется хранить при комнатной температуре в недоступном для детей месте.

Срок годности:

Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока годности.


Условия отпуска из аптек:

Отпускается без рецепта.


Способ применения

Наружное применение


При дискомфорте наружных половых органов (вульвы) Вы можете наносить гель Мульти-Гин Актигель пальцем (перед нанесением следует обязательно вымыть руки).

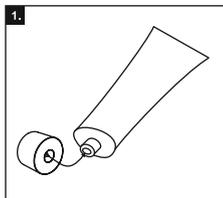


1. Снимите колпачок с тубика. Перед первым применением используйте обратную сторону колпачка для того, чтобы проколоть запечатанный тубик.

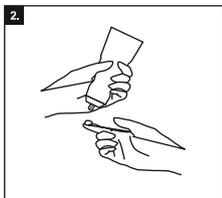

2. Удерживайте тубик одной рукой и расположите указательный палец другой руки рядом с тубиком, как показано на рисунке. Слегка сожмите тубик. Продолжайте сжимать до тех пор, пока на указательном пальце не окажется достаточное количество геля, как показано на рисунке.

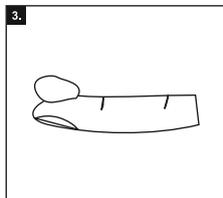

3. Количество геля на Вашем указательном пальце должно быть достаточным для того, чтобы покрывать, по крайней мере, кончик пальца (2 мл).

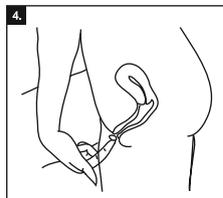

4. Нанесите гель на наружные половые органы.



Импортер и организация, принимающая претензии:

ООО «ОДА Фарма»
Юридический адрес:
123112, г. Москва, Греческая наб.
д. 12, помещ. 10/45, офис 347
support@odapharma.com
+7 (495) 222-01-30



Компания-производитель:
BioCIn BV, Delftechpark 55,
2628 XJ Delft, Нидерланды




0482


PS1101.4
K18
7751391

• Введение внутрь


Вы можете использовать специальный аппликатор. Он прилагается в комплекте и навинчивается на тюбик. С помощью аппликатора Вы можете ввести гель во влагалище. После использования Вы можете оставить аппликатор на тюбике, промыв его теплой водой и затем надеть на него колпачок. Средство можно вводить внутрь не аппликатором, а пальцем. Для этого вымойте руки и нанесите гель на указательный палец в количестве, которое должно быть по размеру не меньше кончика указательного пальца. Введите палец во влагалище.

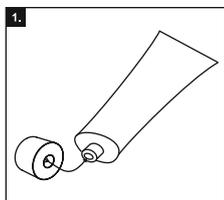


1. Снимите колпачок с тюбика. Перед первым применением используйте обратную сторону колпачка для того, чтобы проколоть запечатанный тюбик.

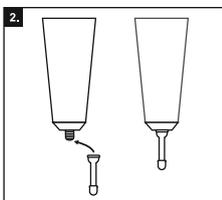


2. Навинтите на тюбик специальный аппликатор, приложенный в комплекте.

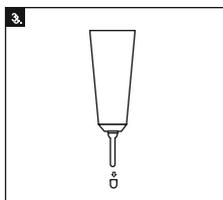


3. Снимите маленький колпачок с аппликатора.

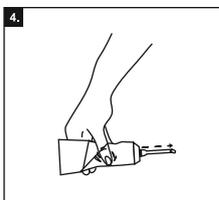


4. Удерживая тюбик одной рукой, сжимайте его, пока из отверстия аппликатора не появится гель. Появление геля означает, что аппликатор заполнен гелем и готов к использованию. Легко сжимая тюбик, потренируйтесь извлекать необходимое количество геля; необходимое количество должно быть по размеру не меньше кончика пальца (2 мл).

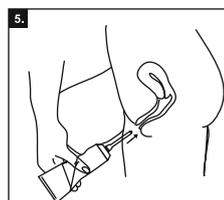


5. Осторожно введите аппликатор, навинченный на тюбике, во влагалище, как показано на рисунке.

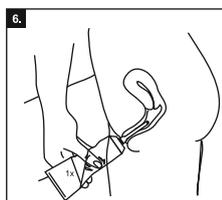

6. Легко сожмите тюбик. Необходимое количество геля должно быть по размеру не меньше кончика пальца. Однако, если Вы внесете больше геля, это не причинит Вам вреда.

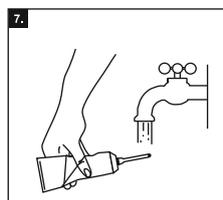

7. После использования Вы можете оставить аппликатор на тюбике, предварительно промыв его теплой водой.

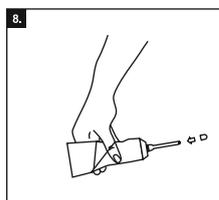

8. Наденьте маленький колпачок на аппликатор.

Общая информация*

Интимный дискомфорт встречается намного чаще, чем Вы думаете. Многим женщинам знакомы такие проблемы: раздражение, болезненные ощущения, жжение, неприятный запах или выделения, повышенная чувствительность во время или после полового акта, раздраженные малые половые губы и зуд. Тесная одежда, влажные ежедневные гигиенические прокладки или гигиенические прокладки часто могут усилить зуд, жжение или раздражение. Гель Мульти-Гин Актигель является эффективным и естественным решением при всех перечисленных проявлениях интимного дискомфорта.

Бактериальный вагиноз

Что такое бактериальный вагиноз?

Бактериальный вагиноз — это нарушение равновесия (дисбаланс) среды влагалища, вызванное бактериями. В норме во влагалище в большом количестве находятся «хорошие» бактерии — лактобактерии — и несколько других типов бактерий, называемых коккоподобными бактериями. Лактобактерии способствуют поддержанию здоровой кислотности во влагалище, которая препятствует росту коккоподобных бактерий. Изменение кислотности влагалищной среды и избыточное присутствие коккоподобных бактерий называется «бактериальным вагинозом».

Как я могу узнать, что у меня бактериальный вагиноз?

Вы можете заметить изменение характера выделений из влагалища. Они могут быть прозрачными или окрашенными и иногда обильными. В большинстве случаев они имеют подозрительный запах, особенно после незащищенного полового акта. Зачастую это сопровождается таким вагинальным дискомфортом, как зуд, раздражение, повышенная чувствительность, краснота и болезненные ощущения. У некоторых женщин бактериальный вагиноз протекает бессимптомно. При этом кислотность влагалища во всех случаях не соответствует норме; pH > 5

Если это инфекция, означает ли это, что я заразилась от кого-то?

Нет, при условии соблюдения обычной гигиены. Бактериальный вагиноз представляет собой избыточный рост бактерий, часто присутствующих во влагалище из-за соседства с анальным отверстием. Хотя это заболевание чаще отмечается у сексуально активных женщин, оно встречается и при отсутствии половой жизни.

Нужно ли лечить?

Да. Бактериальный вагиноз характеризуется в действительности нежелательной микрофлорой влагалища. При отсутствии лечения бактериального вагиноза, бактерии могут подняться в матку и вызвать серьезные проблемы. Особенно важно лечить бактериальный вагиноз у беременных женщин. И, безусловно, профилактика предпочтительнее лечения.